



הוראות צילום למכוני CT

רופא יקר,

אנא מלא את הפרטים ובקש מהמטופל להגיע עם טופס זה למכון ה-CT

שם הרופא:

שם המטופל:

מכון CT:

תאריך:

הנחיות לצילום:

נא לצלם לסת: עליונה תחתונה

סריקה בודדת של הלסת המבוקשת
יש להקפיד לשמור על מרווח בין הלסתות בעת ביצוע הצילום, ניתן בעזרת ווטרולים.

סריקה כפולה
יש לצלם את המטופל עם התותבת (נא לוודא שקיימות 6-8 נקודות גוטה פרקה) ולאחר מכן לצלם רק את התותבת על משטח מוגבה מעט (ניתן להשתמש בקרטון או קלקר לצורך הגבהה, על מנת ליצור הפרדה בין התותבת למשטח הצילום).

הערות הרופא המטפל:

טכנאי יקר,

יש להעלות את הצילום בפורמט DICOM לאתר האינטרנט של השירות בכתובת Alphabiodigital.Alpha-bio.net וללחוץ על הכפתור «מכוני CT / מעבדות שיניים». נא לשים לב למילוי שדות. חובה למען זיהוי נכון ושיוכו של הצילום למטופל.

בכל שאלה או ספק, חברת אלפא ביו ממליצה בחום ליצור קשר טלפוני עם טכנאי השירות בטלפון: 074 - 7256697 על מנת למנוע מהמטופל צילום חוזר.

בברכה,

צוות מחלקת דיגיטל אלפא ביו טכ.

