

לצורך סדים נתמכי שיניים יש צורך בסריקה בודדת Single scan:

- 1 יש לבקש מן המטופל להודיע למכון ה CT כי הצילום הוא למטרת Guided Surgery וכן לציין את הלסת המבוקשת.
- 2 יש להנחות את מכוני הצילום להקפיד לשמור על מרווח בין הלסתות בזמן הצילום. ניתן להשיג זאת ע"י סגירת הלסתות של המטופל על זוג וואטרולים (DENTAL COTTON ROLLS) או כל אביזר אחר שאינו רדיו אופקי וישאיר את הלסתות של המטופל עם רווח וללא תזוזה.

**במקרים מורכבים בהם יש חוסר שיניים מלא או משמעותי והשיניים הקיימות מרוכזות בסגמנט אחד (קדמי/ צידי) ולא מפוזרות על פני כל הלסת יש צורך בסריקה כפולה - Dual scan:**

**○ צילום ראשון:**

יש לצלם את המטופל עם תותבת רדיוגרפית (תותבת עם סמנים רדיוגרפים, גוטה-פרקה).

**○ צילום שני:**

יש לצלם בנפרד רק את התותבת כאשר היא (התותבת) מוגבהת מהמשטח בעזרת קוביית קלקר (או קרטון).

**למכוני ה CT:** נא להעלות את הקבצים לאתר האינטרנט של החברה בכתובת:  
<https://alphabiodigital.alphabio.net> לאזור «כניסה למכוני CT ומעבדות שיניים»  
 חשוב למלא את פרטי המטופל וכן את פרטי הרופא המטפל בכדי לאפשר זיהוי מלא של המקרה באלפא ביו.

**לחברת אלפא ביו טק מערך של טכנאים רופאים ואנשי מקצוע לעזור ולתמוך בכל נושא הקשור בהשתלות באמצעות סדים כירורגיים. אנו מבקשים לא להסס ולפנות בכל שאלה לצוות הטכנאים של אלפא ביו**

**בטלפון: 074 - 7256697**

**או במייל: GuidedSurgery@alpha-bio.net**

בברכה,

צוות מחלקת דיגיטל אלפא ביו טכ.